

TEST DE 6 DROGAS FORMATO COPA CON LLAVE

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hasta 3 a 7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24 a 48 días	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Metanfetaminas (MET)	2 hrs hasta 3-5 días	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	2 hrs hasta 4 días	2000 ng/ml
Benzodiazepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	300 ng/ml

PERMITIR QUE EL TEST CUP, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST

NO manipule la muestra de orina después de su recolección para evitar contaminaciones.

Siga las instrucciones del dispositivo, diseñado para minimizar el contacto y preservar la prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS


NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.


INVÁLIDO: No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.



1. Asegura el casquillo mientras que la copa esté sobre una superficie
2. Técnico despegga la etiqueta para revelar tira de la adulectación

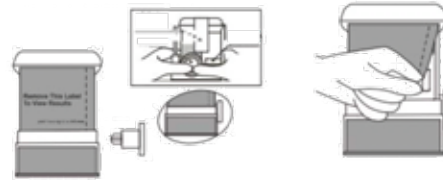

3. Espera 5 minutos leer los resultados de drogas
4. Lea las tiras de adulectación y tiras de alcohol entre 4-5min con la ayuda de la carta de color

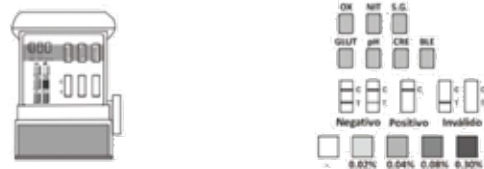

POSITIVO: Aparece una línea de color en la región de Control (C), pero no aparece línea de color en la región del test (T). Este resultado debe considerarse positivo.



VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS