

TEST DE 6 DROGAS FORMATO PANEL

Dispositivo capaz de detectar hasta 6 drogas en una muestra de orina.

Tiene un periodo de detección, dependiendo de la sustancia a detectar desde las 2 horas hasta los 7 días.

Resultados en 5 minutos

Certificados:



Sustancia	Periodo de detección	Punto de corte
Cannabis (THC)	2 hrs hasta 3-7 días	50 ng/ml
Cocaína (COC)	4 hrs hasta 24-48 días	150 ng/ml
Anfetaminas (AMP)	2 hrs hasta 24 hrs	500 ng/ml
Opiáceos (OPI)	2 hrs hasta 4 días	200 ng/ml
Benzodiacepinas (BZO)	2 hrs hasta 3-7 días	200 ng/ml
Metanfetamina (MET)	2 hrs hasta 3-7 días	500 ng/ml

PERMITIR QUE EL TEST PANEL, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST

NO manipule la muestra de orina después de su recolección para evitar contaminaciones.



Siga las instrucciones del dispositivo, diseñado para minimizar el contacto y preservar la prueba.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

NEGATIVO: Aparecen dos líneas de color, una en la región de control (C) y otra en la región del test (T). Este resultado indica que la concentración de la droga está por debajo del nivel detectable del corte para la droga de que se trate.

NOTA: La intensidad de la línea de color en la región del test (T) puede variar. El resultado debe considerarse negativo aunque el color de la línea sea débil.

INVÁLIDO: No aparece la línea de color en la región de control (C). Esto puede deberse a un volumen insuficiente de muestra o un procedimiento incorrecto. Revisa el procedimiento y repite el test.

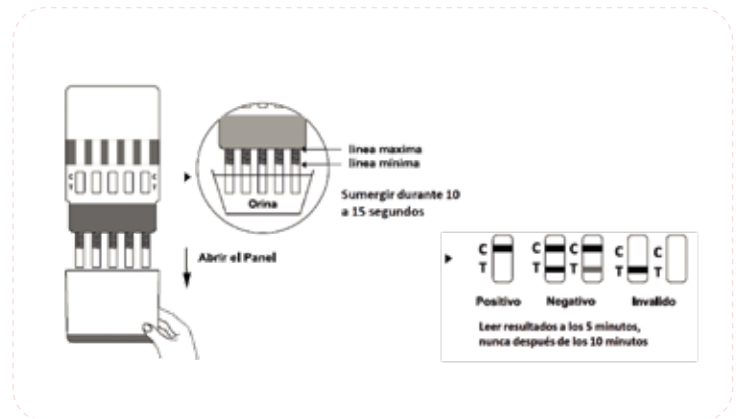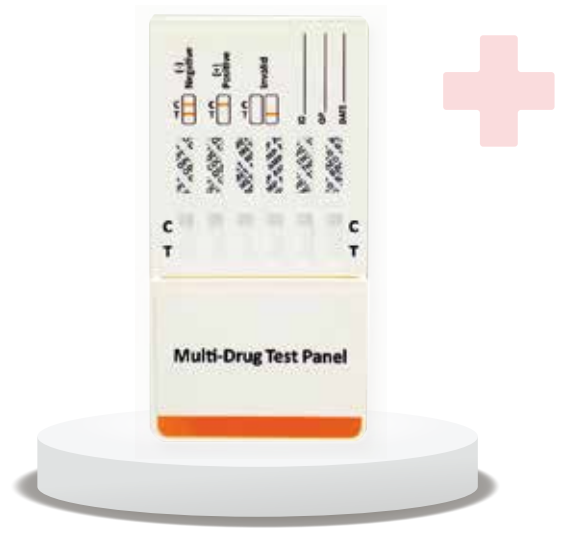

Leer los resultados a los 10 minutos. No leer resultados pasada una hora. Lea el resultado del indicador de alcohol (Cuando incluye el indicador ALC en la prueba) de 3 a 5 minutos.

POSITIVO: Aparece una línea de color en la región de Control (C), pero no aparece línea de color en la región del test (T). Este resultado debe considerarse positivo.



VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS