

## TIRAS DE ALCOHOL ORINA

Test reactivo a la presencia de alcohol en muestra de orina, entregando resultados semi cualitativo en 3 a 5 minutos, dando un porcentaje aproximado dependiendo del tinte de la tira reactiva, con un punto de corte de 0,02.

Leer el resultado a los 2 minutos

 Resultados en 2 minutos

Certificados:



El Orina Alcohol Rapid Test Dipstick es una prueba visual que utiliza concordancia de color para estimar la concentración relativa de alcohol en sangre. Los materiales expuestos a la orina deben considerarse potencialmente infecciosos.

**NO** utilice el Orina Alcohol Rapid Test Dipstick después de la fecha de vencimiento indicada en el paquete de aluminio.


**NO** manipule la muestra de orina después de su recolección para evitar contaminaciones. Siga las instrucciones del dispositivo, diseñado para minimizar el contacto y preservar la prueba.

### INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

**POSITIVO:** El Orina Alcohol Rapid Test Dipstick producirá un cambio del color en la presencia del alcohol en la orina. El color oscilará entre el color azul claro a una concentración relativa de alcohol en sangre del 0,02% y un color azul oscuro cerca del 0,30% de concentración relativa de alcohol en sangre.

Se proporcionan almohadillas de color dentro de esta gama para permitir una aproximación de la concentración relativa de alcohol en sangre. La prueba puede producir colores que parecen estar entre almohadillas de color adyacentes.

**INVÁLIDO:** Si la almohadilla de color tiene un color azul antes de aplicar la muestra de saliva, no utilice la prueba.

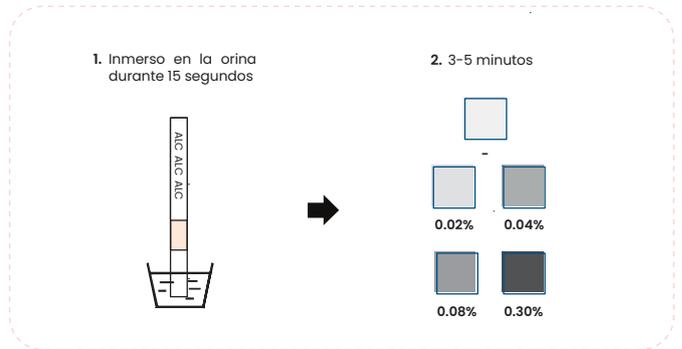

**PERMITIR QUE EL TEST DIPSTICK, Y/O LOS CONTROLES ALCANCEN LA TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C) ANTES DE REALIZAR EL TEST**

**NEGATIVO:** Cuando El Orina Alcohol Rapid Test Dipstick no muestra cambios de color, esto debe interpretarse como un resultado negativo que indica que no se ha detectado alcohol.

**NOTA:** El Orina Alcohol Rapid Test Dipstick es muy sensible a la presencia de alcohol. Un color azul que es más ligero que la almohadilla de color 0,02% debe interpretarse como positivo a la presencia de alcohol en la orina, pero menos del 0,02% de alcohol en sangre relativa.



VISITA NUESTRA WEB Y REVISANUESTROS PRODUCTOS